


①

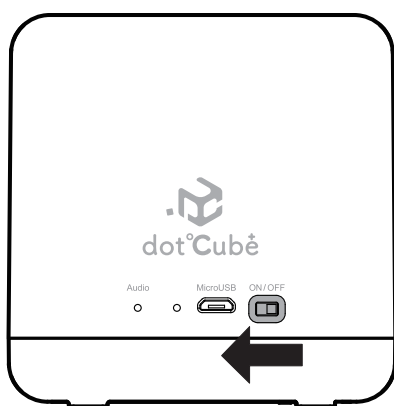

dotCube 本体の電源を ON にして  
30分待ちます。

②



30分経過したら、ダウンロードした  
dotCubeServer アプリを開きます。

③




dotcube 本体に近づき  
下部にある「 FIND dotCube 」をタップします。

Bluetooth でアプリと  
dotCube 本体を接続するので  
必ず Bluetooth を ON にしてください。


※dotCube 本体は、Bluetooth 機能が  
備わっていますので、設定する必要はありません。

4

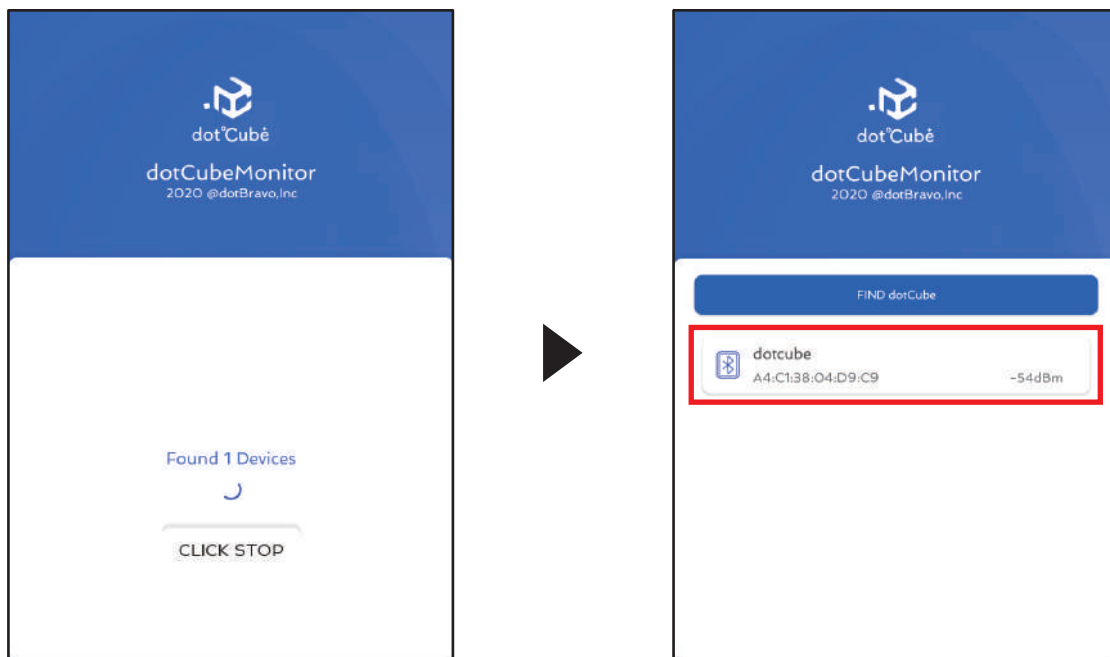


dotCube 本体と接続できたら、連携したい Cube を選択します。

5

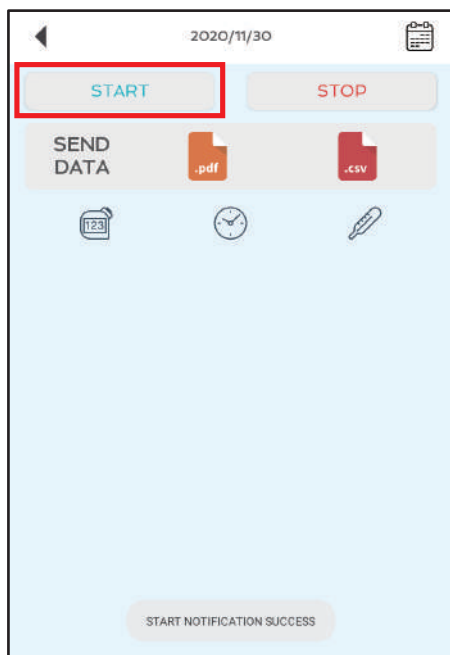


検温の記録を始める場合  
「START」をタップします。

6

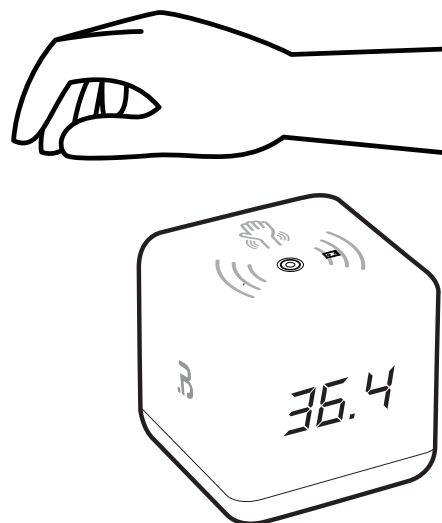


検温します。

7

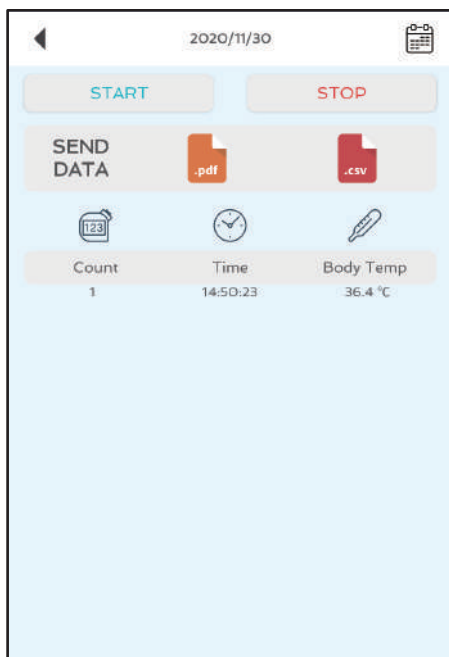


検温した温度と時刻がアプリに表示されます。

8

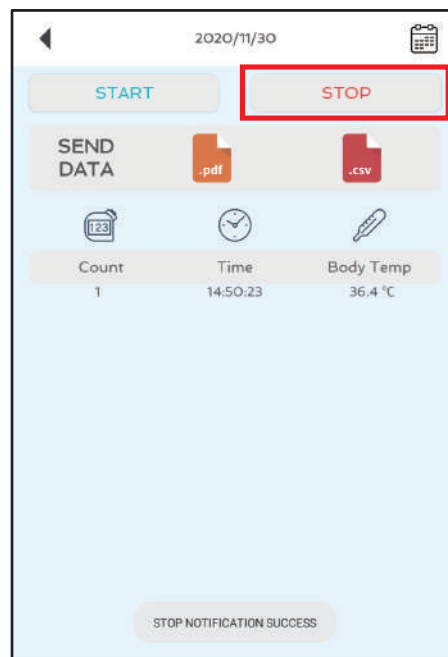

検温の記録をやめるときは「STOP」をタップします。

## <検温記録の表示について>

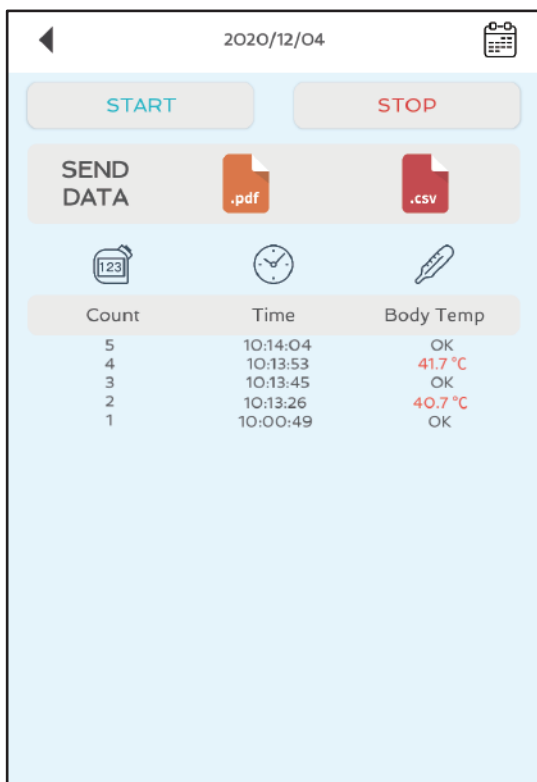


「 34.4°C以下 → OK 」

「 37.5°C以上 → 赤 」で表示されます。

Bluetooth のデータ通信のため  
次の検温までに 11 秒程度時間が空くと  
OK 表示のチェックが記録されます。


## <検温記録を出力する>

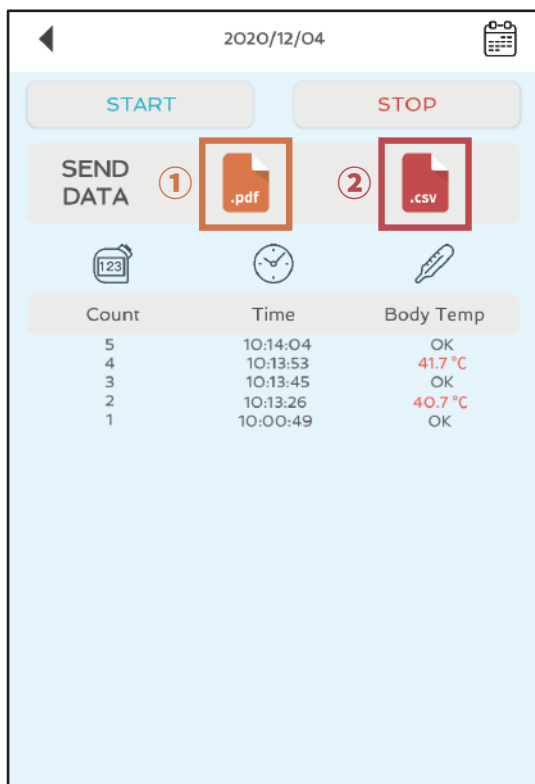

①PDF で出力します

②CSV で出力します

①PDF で出力

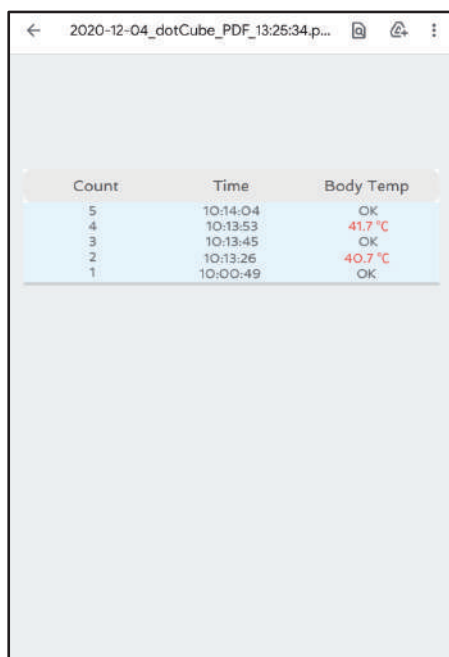


②CSV で出力

	A	B	C
1	Count	Time	BodyTemp
2	0	10:00:49	0
3	1	10:13:26	40.7
4	2	10:13:45	0
5	3	10:13:53	41.7
6	4	10:14:04	0
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			


## <過去の検温記録を見る>

①

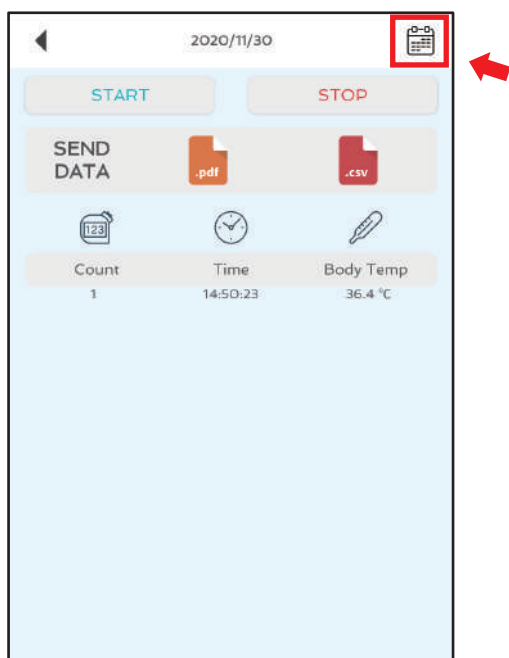

右上のカレンダーマークをタップする。

②

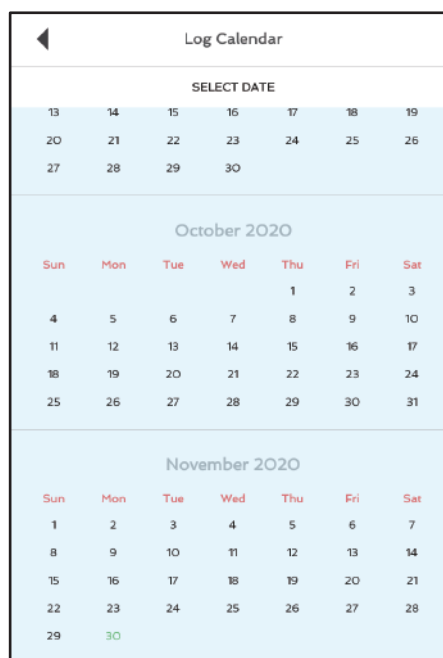

カレンダーが表示されます。

③



(1)検温記録を見たい日付をタップして  
(2)右上のチェックマークをタップすると  
指定した日付の検温記録が表示されます。